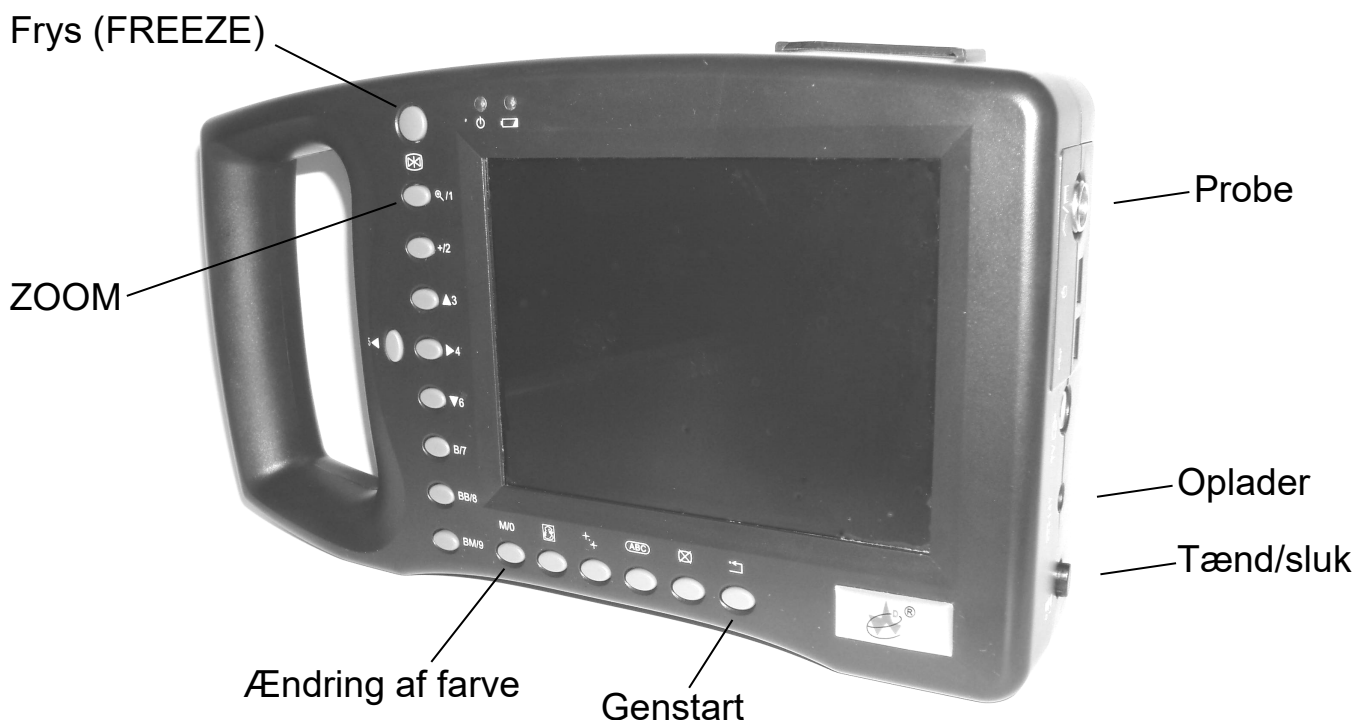
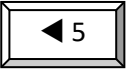
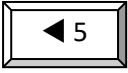
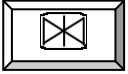
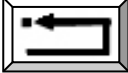
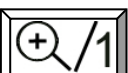

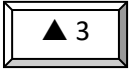
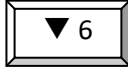

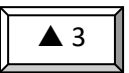
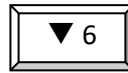


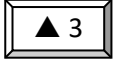





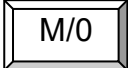
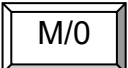
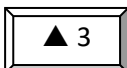
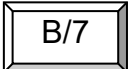
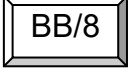
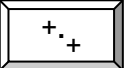
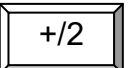
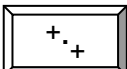
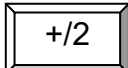
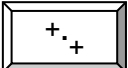
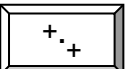


# Vejledning til WED-2000AV ultralydsscanner



Tænd/sluk	<b>Tænd</b> scanneren på Tænd/sluk-knappen på siden.
	Tryk på  og scanneren er klar.
	Tryk for at <b>fryse</b> (FREEZE) billedet.
	Tryk for at <b>genstarte</b> scanneren.
	<b>ZOOM:</b> Tryk for ændring af scanningsdybde, aktuel dybde kan aflæses nederst i kolonnen til højre for scanningsbilledet. Standard 160 mm.
Frekvens- indstilling FREQ	Tryk på  FREQ i øverste højre kolonne lyser, herefter kan der med  og  ændres frekvens. Standard er 3,5 MHz.
Forstærkning af lysstyrken GAIN	Tryk på  2 gange. GAIN-knappen i øverste højre kolonne lyser, herefter kan der med  og  justeres fra 0 til 60.

<p>Lysstyrke</p> 	<p>Tryk på  Lysstyrke-knappen (symbol med sol) i øverste højre kolonne lyser, herefter kan lysstyrken ændres med  og  Standard er 32.</p>
<p>Kontrast</p> 	<p>Tryk på  2 gange. Kontrast-knappen (symbol med sort halvcirkel) i øverste højre kolonne lyser, herefter kan der justeres på kontrasten med  og  Standard er 32.</p>
<p>Skærmfarve</p> 	<p>Tryk på  derefter tryk  for at ændre farve til orange eller grøn eller blå eller grå.</p>
	<p>Tryk for at få normal scanningstilstand.</p>
	<p>Tryk for at få to scanningbilleder ved siden af hinanden. Tryk igen for at fryse det ene billede. Tryk igen for at fryse det andet billede. Tryk "Freeze" for at fryse begge billeder.</p>
	<p>Tryk for at få målinger frem på skærmen.</p>
	<p>Måling af distance (størrelse i mm). Tryk for at markere med et "+" på et scanningbillede i "Freeze"-tilstand. Tryk 2 gange på  og mm vil komme frem i højre side, ud fra de forskellige tegn. Brug 3-4-5-6 som piletaster i "Freeze"-tilstand til at placere markering "+". For at foretage ny måling tryk på  og nyt tegn viser sig på skærmen. Tryk  og ny måling kan foretages. Ved at trykke på  kan der laves små justeringer, med de forskellige piletaster.</p>
<p>Batteri</p>	<p>Kapacitet 4 timer. Aktual kapacitetstid aflæses i højre hjørne.</p>
<p>Rengøring</p>	<p>Scanner og probe tørres af med en opvredet klud efter brug og opbevares i kuffert.</p>